

Respirátor KN95,FFP2 NR

Vždy se ujistěte že výrobek je :

- ! Vhodný pro danou aplikaci
 - ! Správně nasazen
 - ! Nošen po celou dobu expozice
 - ! Vyměněn když je potřeba.
 - ! Po použití zlikvidovat
-
- Pro vhodné a správné použití je třeba dodržovat místní předpisy a řídit se dle všech poskytnutých informací.
 - Nepoužívejte, máte-li vousy nebo jiný porost na obličeji, který by mohl zamezit těsnému přilnutí mezi obličejem a ochranným prostředkem.
 - Nahradte respirátor jeli poškozen, dýchání se stane obtížným a také na konci každé směny.
 - Nikdy tento prostředek neupravujte, nepozměňujte a ani neupravujte.
 - Jedná se o jednorázový ochranný prostředek.

Pokyny k nasazení:

Návod :

- důkladná hygiena rukou (Před prvním použitím je nutná důkladná hygiena rukou pomocí mýdla a teplé vody.)
- Po umytí rukou přiložte vrchní část respirátoru k obličeji a následně přitlačte na obličej jeho spodní část.
- Když respirátor dokonale přilne k vaší tváři, upravte elastické popruhy tak, aby ho udržovali v bezpečné poloze.
- Správně nasazená ochranná maska musí těsně doléhat k obličeji a má zakrývat ústa, nos i bradu.
- Muži by měli být oholení, protože brada může způsobit netěsnosti.
- Při snímání masky se dotýkejte pouze popruhů, ne části, která filtruje vzduch.



Kontrola těsnosti :

Oběma rukama zakryjte přední část polomasky – postupujte opatrně abyste tím nasazením prostředku neporušili. Prudce vydechněte. Pokud bude vzduch pronikat kolem nosu, upravte tvar nosové svěrky. Znovu zkontrolujte těsnost a nasazení podle postupu. Když bude vzduch unikat kolem okrajů masky. Upravte nasazení.

Skladování:

Výrobek může být skladován v průměrných podmínkách až -20 °C až 38 °C a 80% relativní vlhkostí, pokud tyto podmínky nebudou působit déle než 3 měsíce. Před prvním použitím se nezapomeňte přesvědčit že uváděná skladová životnost výrobku nevypršela. Pro přepravu a skladování použijte originální balení.

Značení :

NR= jednorázové použití (jen na jedinou směnu)

Schválení: Tyto produkty splňují základní bezpečnostní požadavky podle směrnice R2016/425 a EN149:2001 + A1:2009 a jsou označeny symbolem CE. Certifikát vydán Ente Certificazione Macchine S.r.l., Italy (notifikovaná osoba 1282)